

## Инструкция по применению

### **Boston™ Simplus Многофункциональный раствор в одном флаконе**

Этот листок-вкладыш содержит важную информацию. Внимательно прочтите его и сохраните для дальнейшего использования.

**Специально разработан для жестких газопроницаемых контактных линз из фторсиликонакрилата и силиконакрилата**

**Описание и показания к применению**

Многофункциональный раствор Boston™ Simplus представляет собой инновационное средство для очистки, дезинфекции и кондиционирования жестких газопроницаемых линз в одном флаконе. Раствор одобрен для использования с газопроницаемыми контактными линзами из фторсиликонакрилата и силиконакрилата. Многофункциональный раствор Boston™ Simplus удаляет белок и липиды с поверхности линз, а также помогает защитить линзы от накопления стойких отложений. Кроме того, раствор предназначен для промывки линз, позволяя устранить разрыхленные отложения с их поверхностей. Многополимерная амортизирующая система обеспечивает кондиционирование линзы, смазывая ее при размещении и улучшая равномерность смачивания. Запатентованный увлажнитель сохраняет смачиваемость линзы. Формула оказывает успокаивающее действие на глаза. Она также содержит систему консервантов, продемонстрировавших эффективность при уничтожении вредных микроорганизмов. Раствор эффективен для очистки и дезинфекции, кроме того, он подходит для глаз при размещении линзы.

**СОСТАВ:** Стерильный водный буферный раствор, содержащий полоксамин, гидроксиалкилфосфонат, борную кислоту, борат натрия, хлорид натрия, гидроксипропилметилцеллюлозу, глюкозамин и консерванты: глюконат хлоргексидина (0,003 %) и полиаминопропилбигуанид (0,0005 %).

#### **УКАЗАНИЯ:**

Снимите защитное кольцо с горлышка флакона. Не используйте раствор, если защитное кольцо на горлышке флакона сломано или отсутствует.

1. Для надлежащей дезинфекции выполните все перечисленные ниже этапы. Вымойте руки слабым мыльным раствором. (Будьте осторожны! Жидкое мыло может содержать суспендирующие вещества на масляной основе.)
2. Поместите линзы в пустой контейнер для линз и залейте свежим многофункциональным раствором Boston™ Simplus. Оставьте линзы в растворе минимум на четыре (4) часа или на всю ночь, прежде чем надевать их.
3. После замачивания извлеките линзы из контейнера и аккуратно протирайте их в течение двадцати (20) секунд с обеих сторон, нанеся две-четыре (2—4) капли многофункционального раствора Boston™

• Не допускайте контакта кончика флакона с любой поверхностью или глазом, т. к. это может привести к загрязнению раствора или повреждениям глаз.

• Всегда мойте руки, прежде чем брать и надевать линзы.

• Ни в коем случае не используйте раствор повторно. Всегда пользуйтесь только свежим раствором для очистки и дезинфекции линз.

• Когда не используете флакон, держите его колпачок закрытым, чтобы не допустить загрязнения или испарения раствора.

• Не используйте никаких лекарственных препаратов для глаз вместе с этим раствором без указания врача-офтальмолога.

• Выбросьте флакон с остатками раствора через 3 месяца с момента вскрытия.

• Не используйте раствор по истечении срока годности.

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Контейнеры для линз могут представлять серьезную угрозу заражения микроорганизмами и раздражения глаз.

Контейнеры для линз следует ежедневно промывать поверхностно-активным средством для очистки контактных линз, ополаскивать теплой кипяченой водой и оставлять высыхать на воздухе, не закрывая крышечкой. Следует менять контейнеры для линз как можно чаще.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** В случае возникновения, сохранения или усиления раздражения либо чрезмерного слезотечения, а также в случае ухудшения зрения прекратите использование продукта и немедленно обратитесь к врачу-офтальмологу.

**Нежелательные реакции (проблемы и способы их решения):**

Вы должны знать, что могут возникнуть указанные ниже проблемы.

• Покалывание, жжение, зуд (раздражение) или другая боль в глазу

• Ношение линзы стало менее комфортным по сравнению с ощущением при первом надевании

• Аномальное ощущение в глазу (например, ощущение инородного тела, поцарапанной области)

• Чрезмерное слезотечение (слезоотделение) или необычные выделения из глаза

• Покраснение глаз

• Снижение остроты зрения (плохая острота зрения)

• Расфокусированность зрения, радужные круги или ореолы вокруг предметов

• Чувствительность к свету (светобоязнь)

• Сухость глаз

**Если вы заметили что-либо из вышеперечисленного, немедленно снимите линзы.**

Если дискомфорт или проблема исчезнет, внимательно осмотрите линзу.

• Если линза имеет какие-либо повреждения, не надевайте ее снова.

Simplus на ладонь. Отдельная ежедневная очистка не требуется.

4. Промывайте линзы устойчивой струей многофункционального раствора Boston™ Simplus в течение приблизительно пяти (5) секунд, чтобы удалить разрыхленные отложения с поверхности и разместить линзы.
5. После каждого использования тщательно промывайте внутреннюю часть контейнера для линз теплой кипяченой водой и сушите на воздухе.

Меры предосторожности. Во избежание загрязнения не позволяйте кончику флакона контактировать с какими-либо предметами. Когда флакон не используется, храните его полностью закрытым.

**ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОБЛЕМЫ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ ЗА НИМИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГЛАЗ.**

Для правильного использования линз и средств по уходу за ними, в том числе контейнера для линз, обязательно следуйте указаниям своего врача-офтальмолога или оптометриста и всем инструкциям на упаковке. Проблемы с глазами, включая язву роговицы и инфекцию, могут быстро развиваться и привести к потере зрения (в том числе к слепоте).

- Не используйте, если у вас аллергия на какой-либо компонент данного раствора.
- Не используйте с мягкими (гидрофильными) контактными линзами.
- Необходимо соблюдать процедуры ухода за линзами, рекомендованные вашим врачом-офтальмологом. Несоблюдение этих процедур может привести к развитию серьезных глазных инфекций.

Поместите линзу в контейнер для хранения и обратитесь к вашему врачу-офтальмологу.

- Если на линзе имеется грязь, ресница или другое инородное тело либо проблема исчезла, а линза выглядит неповрежденной, тщательно очистите, промойте и продезинфицируйте ее, а затем наденьте снова.

**Если проблема не исчезнет, немедленно снимите линзу и обратитесь к своему врачу-офтальмологу.**

Возникновение какой-либо из перечисленных выше проблем может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, например инфекции, язвы роговицы, неоваскуляризации или ирита. Немедленно обратитесь к врачу-офтальмологу, чтобы определить проблему и быстро приступить к лечению во избежание серьезного повреждения глаз. При посещении врача-офтальмолога для определения потенциальной глазной инфекции возьмите с собой на прием линзы, растворы и контейнер для линз для возможного бактериологического исследования, чтобы более точно установить вид всех микроорганизмов.

**Дата пересмотра: 2022-10**



Bausch & Lomb  
Incorporated  
1400 North  
Goodman Street  
Rochester, NY  
14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated  
Cork Road Industrial Estate, Waterford, X91 V383, Ireland



®/TM товарные знаки компании Bausch & Lomb Incorporated или её аффилированные компании.  
Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

Made in Italy/Сделано в Италии

Место производства: Бауш энд Ломб - Иом СпА, Виа Пасубио 34, Мачерно, Монза Брианза, 20846, Италия.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Бауш Хелс», Россия, РФ, 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н, тел. (495) 510-28-79, [Russia.Claims@bausch.com](mailto:Russia.Claims@bausch.com)

151083558W-03