
Типовой текст инструкции по применению

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции по применению - они содержат важную информацию о том, как использовать данный продукт. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему фармацевту, вашему врачу или свяжитесь с нами.



Артелак® Ночной Уно

Состав:

0,24% гиалуроновой кислоты (в форме гиалуроната натрия), карбомера, глицерина и липидного компонента (триглицериды среднецепочечные).

Назначение: Средство для увлажнения глаз, которое поддерживает все три слоя слезной пленки с целью улучшения увлажненности поверхности глаз при ощущении сухости в глазах.

Что такое Артелак® Ночной Уно?

Артелак® Ночной Уно представляет собой непрозрачный офтальмологический раствор, содержащие 0,24% гиалуроновой кислоты (в форме натрия гиалуроната), карбомер, глицерин, липидный компонент (триглицериды среднецепочечные), натрия гидроксид и воду для инъекций.

Передовая формула обладает очень хорошей переносимостью, поскольку не содержит консервантов и буферов. Медицинское изделие не содержит в своем составе лекарственное средство.

Как применять Артелак® Ночной Уно?

Артелак® Ночной Уно это средство для комплексного увлажнения, которое поддерживает все три слоя слезной пленки: липидную, водную и слизистую фазу с целью улучшения и поддержания увлажненности глазной поверхности при любых симптомах сухости и дискомфорта в глазах.

Тройной механизм действия Артелак® Ночной Уно

Липидный компонент - среднецепочечные триглицериды, обладает защитным эффектом, уменьшая испарение липидного слоя в слезной пленке.

Натуральный увлажнитель - гиалуроновая кислота (в форме гиалуроната натрия), которая обнаруживается в структурах глаза здорового человека и в натуральной слезной пленке в совокупности с глицерином (глицеролом) притягивают влагу, поддерживая и восстанавливая водный слой в слезной пленке.

Компонент карбомер за счет своей вязкой структуры связывает молекулы воды, восстанавливает муциновый слой. Карбомер также обладает длительным увлажняющим действием

Когда рекомендуется использовать Артелак® Ночной Уно/ потенциальные потребители?

Артелак® Ночной Уно — это средство для обеспечения и сохранения здорового состояния поверхности глаза, распределяясь на поверхности и обеспечивая интенсивное увлажнение для немедленного и длительного облегчения симптомов.

Это идеальный продукт для любого потребителя, страдающего от спектра симптомов сухости глаз, таких как усталость, раздражение, жжение и/или слезоточивость.

Может применяться как в домашних условиях, так и в ЛПУ.

Показания к применению раствора офтальмологического Артелак® Ночной Уно

Для увлажнения передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы):

- при синдроме «сухого глаза», при котором требуется дополнительное увлажнение конъюнктивы и роговицы, средней и тяжелой степени, синдроме Шегрена;
- при необходимости устранения сухости, ощущении песка в глазах, жжении, слезотечении, зуде, покраснении, утомлении глаз, которые возникли вследствие перенесенных заболеваний, в том числе конъюнктивитов, кератоконъюнктивитов;
- для устранения повышенной сухости глаз в случае систематического использования таких лекарственных препаратов, как противовоспалительные, гормональные средства, антибиотики, антигистаминные, противоглаукомные, антидепрессанты, бета-блокаторы, спазмолитики, диуретики;
- для увлажнения глаз после перенесенных офтальмохирургических вмешательств, в том числе лазерных рефракционных операций (ЛАСИК и другие), в том числе при микротравмах роговицы;
- для устранения ощущения дискомфорта у пациентов, которые используют контактные линзы, в том числе для профилактики сухости глаз;
- с целью профилактики конъюнктивально-роговичного ксероза в случае загрязнения среды (дым, смог, пыль и другие негативные факторы);
- при повышенных зрительных нагрузках при частой работе за компьютером или любым дисплейным носителем;
- при сухости глаз в следствие нахождения в помещении с сухим воздухом от кондиционера или отопления;
- при сухости или слезотечении с связи с ветренной погодой.

Когда не рекомендуется использовать Артелак® Ночной Уно/противопоказания?

Не следует применять данное медицинское изделие, если у вас повышенная чувствительность к любому из компонентов.

Важная информация по использованию Артелак® Ночной Уно/предупреждения, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты

- Крайне редко сообщалось о местных реакциях повышенной чувствительности. Применение в таких случаях следует прекратить и обратиться к врачу.
- Данный продукт может вызвать временное помутнение зрения после закапывания, в связи с наличием в составе компонента Карбомер, что может оказать негативное влияние на управление транспортными средствами или работу с механизмами.
- Следует избегать контакта наконечника флакона с пальцами или любыми другими поверхностями, чтобы избежать возможной контаминации раствора.
- После использования стряхните все оставшиеся после применения капли.
- Снимите контактные линзы перед применением.
- Подождите примерно 15 минут перед использованием другого офтальмологического продукта или перед надеванием контактных линз.
- Не использовать после истечения срока годности.
- Не использовать, если упаковка или тубик-капельница повреждены.
- Хранить в недоступном для детей месте

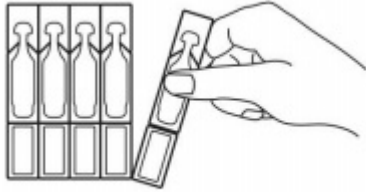

Как часто и как долго рекомендуется использовать Артелак® Ночной Уно?

Закапывают одну каплю Артелак® Ночной в конъюнктивальный мешок глаза по мере необходимости. Можно использовать каждый день и так часто, как необходимо, в течение дня и на ночь.

Ограничения по продолжительности применения отсутствуют.

Выбросьте уно-дозовую упаковку (тубик-капельницу) после использования.

Как использовать Артелак® Ночной Уно?

	<p>1. Осторожно отделите одну тьюбик-капельницу упаковку от пластинки</p>
	<p>2. Открутите (не тяните) верхнюю крышку тьюбик-капельницы.</p>
	<p>3. Немного наклоните голову и осторожно потяните нижнее веко пальцем своей свободной рукой. Держите тьюбик-капельницу как можно вертикально вашему глазу, при этом отверстие должно быть направлено вниз. Убедитесь, что тьюбик-капельница не касается вашего глаза во избежание возможной травмы или повреждения. Затем аккуратно сожмите тело тьюбик-капельницы для выдавливания одной капли.</p> <p>Затем закройте глаз и медленно поворачивайте, чтобы оптимально распределить каплю на поверхности вашего глаза.</p>

Стерилизация (данная информация может быть указана при помощи манипуляционного символа с расшифровкой)

Стерильно, с использованием методов асептической обработки

Порядок действий в случае нарушения стерильной упаковки (данная информация может быть указана при помощи манипуляционного символа с расшифровкой)

Не использовать при повреждении упаковки

Как хранить Артелак® Ночной Уно?

Хранить при температуре +1 - +25°C.

Хранить в защищенном от света месте.

Условия транспортировки

Упаковки с раствором офтальмологическим Артелак® Ночной должны быть защищены от нагревания и дождя (влаги). Температура при транспортировке +1°C – +30°C и относительная влажность не более 80%.

Форма выпуска:

Артелак® Ночной Уно доступен в удобной уно-дозовой упаковке без консервантов (SDU). Артелак® Ночной также доступен в упаковках по 10 мл раствора офтальмологического.

Символы

<u>Символ</u>	<u>Название</u>
	Стерилизация с использованием асептического технологического процесса
	Температурный предел
	Не использовать если упаковка или тубчик-капельница повреждены
	Инструкции по применению
	Срок годности
	Код серии
	Не использовать повторно
	Хранить в защищенном от света месте
	Производитель

Утилизация:

Артелак® Ночной уно не токсичен, не создают чрезмерную нагрузку на человека или окружающую среду в процессе эксплуатации, хранения или транспортировки. Для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде необходимо соблюдать требования безопасности, условия хранения, транспортирования и эксплуатации.

Артелак® Ночной уно направляется на утилизацию в соответствии с гигиеническими требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», принятыми в Российской Федерации.

Артелак® Ночной уно, подлежащий утилизации после использования, а также в связи с истечением срока годности или в случае нарушения целостности упаковки, относится к классу опасности А. При использовании в домашних условиях допускается утилизация в контейнеры с бытовым мусором.

Медицинские изделия после использования по назначению в ЛПУ классифицируются как класс опасности В. После аппаратных методов дезактивации с использованием физических методов и изменения внешнего вида отходов, что исключает возможность их повторного использования, могут накапливаться отходы класса В, временно хранящиеся, перевозимые, уничтожаемые и утилизируемые вместе с классом А. Упаковка дезактивирующих медицинских отходов класса В должна быть маркирована с указанием дезактивации медицинских отходов. Утилизация должна осуществляться аккредитованными организациями.

Ознакомиться с инструкцией можно на сайте www.bausch.ru

В случае возникновения вопросов, связанных с качеством медицинского изделия, необходимо обратиться по следующему адресу к Уполномоченному Представителю Производителя в Российской Федерации:

ООО “Бауш Хелс”, Россия, 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Даниловский, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

тел./факс: +7 495 510 2879, e-mail: Russia.Claims@bausch.com

Производитель:

Др. Герхард Манн хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия,

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,

Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germany

Произведено в Германии