

BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A))

с технологией MoistureSeal™

Инструкции по применению

Производство: Рочестер

Рынок: Российская Федерация

Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A))*с технологией MoistureSeal™***▲ Инструкции по применению**

Настоящая инструкция содержит сведения о ношении гидрофильных мягких контактных линз BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)) и уходе за ними:

Применимо к:

Название продукта	Материал	Содержание воды	Упаковочный раствор
Линзы контактные мягкие BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А)	Самфилкон А	46% от веса	Физиологический раствор с боратным буфером и полоксамином

Показания

Контактные линзы мягкие BAUSCH+ LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)) предназначены для ежедневного ношения в целях коррекции рефрактерной аметропии (миопии и гиперопии) у пациентов с афакией и без нее, при отсутствии заболеваний глаз, с астигматизмом до 2.00 диоптрий и менее, который не влияет на остроту зрения. Линзы со сферической силой от +20.00 D до -20.00 D могут использоваться для ношения с часто/запланированной заменой, либо для одноразового ношения.

Описание и ношение

Линзы предназначены для дневного или пролонгированного ношения, с периодом замены в соответствии с рекомендациями специалиста. Также допускается однократное ношение линз с последующей утилизацией. При многократном использовании, перед повторным ношением линзы следует очистить, промыть и дезинфицировать.

Рекомендованный период ношения:

Дневное ношение – (со снятием на ночь) – 30 дней.

Пролонгированное ношение (без снятия на ночь) - до 7 дней и 6 ночей непрерывного ношения, после чего линзы следует снять, очистить, промыть и дезинфицировать перед повторным использованием. Срок замены линз при пролонгированном режиме ношении - до 30 дней в соответствии с рекомендациями специалиста-офтальмолога.

Однократное ношение

Когда линзы мягкие контактные BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A)) назначаются для однократного ношения, их следует утилизировать после удаления.

Всегда следуйте рекомендованному врачом - офтальмологом графику ношения.

STERILE

Линзы поставляются в стерильном виде, и предназначены для многократного использования, в соответствии с рекомендациями специалиста. Линзы стерилизованы паром.

BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A))

с технологией MoistureSeal™

Инструкции по применению

Производство: Рочестер

Рынок: Российская Федерация

Если упаковка повреждена или вскрыта – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Надевание и снятие линз

Перед работой с линзами тщательно вымыть и вытереть руки; не пользоваться ароматическими мылами и мылом, содержащим медикаменты. Вылить линзу на ладонь. Удостовериться в том, что линза не вывернута наизнанку.



Перед надеванием осмотреть линзы; при обнаружении царапин и повреждений, не надевать.

Снимать линзу следует чистыми и сухими руками. Пальцем сдвинуть линзу вниз, в сторону белка глаза, и снять. Если линза снимается с трудом, использовать увлажняющие капли.

Уход за линзами

- Для сохранения здоровья глаз необходимо очищать и дезинфицировать линзы в промежутках между ношением.
- Использовать продукты для ухода за мягкими линзами в соответствии с инструкциями производителя.
- Всегда использовать свежий раствор для ухода за линзами, с действительным сроком годности.
- Не пользоваться другими растворами (проточная вода, бутилированная вода или слюна) для промывания, хранения и смачивания линз.
- В период, когда линзы не используются, их следует хранить погруженными целиком в рекомендованный раствор.
- При очистке линз также следует чистить контейнер для линз.
- В конце периода ношения, установленного специалистом, линзы подлежат утилизации в контейнер с бытовым мусором.
- Перед работой с линзами вымыть и вытереть руки.
- Избегать контакта косметических средств, лосьонов, мыл, кремов и парфюмерных изделий с глазами и линзами.
- Не извлекать линзы из контейнера и из глаз при помощи острых предметов, в том числе – ногтями.

Противопоказания

Не допускается ношение контактных линз при наличии следующих состояний:

- Аллергия, воспаление, инфекции, покраснение глаз или области вокруг глаз;
- Сухость глаз (недостаток слезной жидкости)
- Проблемы со здоровьем, действующие на глаза (простуды, грипп);
- Все системные заболевания, поражающие глаза.

BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon A))

с технологией MoistureSeal™

Инструкции по применению

Производство: Рочестер

Рынок: Российская Федерация

Предупреждения и предосторожности

Нарушения графика ношения, установленного специалистом, и правил ухода за линзами могут привести к увеличению риска серьезных глазных инфекций.

Не допускается ношение контактных линз при наличии следующих состояний:

- Аллергия, воспаление, инфекции, покраснение глаз или области вокруг глаз;
- Сухость глаз (недостаток слезной жидкости)
- Проблемы со здоровьем, действующие на глаза (простуды, грипп);
- Все системные заболевания, поражающие глаза.

В ряде случаев перед надеванием контактных линз **следует проконсультироваться у специалиста:**

- Занятия водными видами спорта.
- Пребывание в помещениях с сухим либо запыленным воздухом.
- Использование лекарственных препаратов.

При наличии нижеуказанных проблем следует **немедленно** снять линзы:

- Покалывание, жжение, зуд, раздражение и прочая болевая симптоматика со стороны глаз.
- Менее комфортные ощущения по сравнению с имеющимся опытом ношения линз.
- Необычные выделения из глаз, обильное слезотечение.
- Покраснение глаз.
- Выраженная либо постоянная сухость глаз.
- Снижение остроты зрения, помутнение зрения.
- Появление радужного свечения либо ореолов вокруг источников света.
- Светобоязнь.

Если указанная симптоматика сохраняется после снятия или замены линзы, снять линзу и **проконсультироваться у специалиста - офтальмолога**. Пренебрежение подобной симптоматикой может привести к развитию более серьезных состояний.

Условия транспортирования, хранения и эксплуатации

Хранение: при температуре от 5 °С до 40 °С. Не замораживать.

Условия, которых следует избегать:	Температура:	Избегать выше 40° С и ниже 5° С, не замораживать. Хранить при комнатной температуре
	Свет:	Избегать прямого солнечного света
	Удар:	Избегать стремительных ударов
	Влажность:	Избегать влажности выше 80%, необходимо хранить при менее чем 60%

BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon А))

с технологией MoistureSeal™

Инструкции по применению

Производство: Рочестер

Рынок: Российская Федерация

Вещества, которые следует избегать:	Вода:	Избегать контакта с водой
	Слюна:	Избегать контакта со слюной
	Табачный дым:	Избегать длительного нахождения в помещении, задымленном табачным дымом

Предосторожности при работе с растворами:

Не использовать дезинфекционную систему Allergan Ultracare и любые ее компоненты (дезинфицирующий раствор Oxysept Ultracare, нейтрализующие таблетки Oxysept, энзимный чистящий раствор Ultrazyme) для очистки и дезинфекции контактных линз Bausch + Lomb (самфилкон А), поскольку это может привести к нарушению их формы.

Срок годности

5 лет

Утилизация:

Линзы контактные мягкие не токсичны, не создают чрезмерную нагрузку на человека или окружающую среду в процессе эксплуатации, хранения или транспортировки. Для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде необходимо соблюдать требования безопасности, условия хранения, транспортирования и эксплуатации.

Линзы контактные мягкие направляются на утилизацию в соответствии с гигиеническими требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», принятыми в Российской Федерации.

Линзы контактные мягкие, подлежащие утилизации после использования, а также в связи с истечением срока годности или в случае нарушения целостности упаковки, относятся к классу опасности А. Допускается утилизация в контейнеры с бытовым мусором.

Гарантия

Гарантия на мягкие контактные линзы не предоставляется.

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации

ООО «Бауш Хелс», Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка д. 31, стр. 5,

тел. / факс +7 495 510 2879

BAUSCH + LOMB ULTRA® (самфилкон А (samfilcon А))

с технологией MoistureSeal™

Инструкции по применению

Производство: Рочестер

Рынок: Российская Федерация

Символика и маркировка



(Паровоздушная стерилизация)

дата выдачи: 2018-07



(Сертификация системы качества)



Продукт соответствует требованиям Схемы утилизации отходов (взнос уплачен).

Bausch & Lomb Incorporated



1400 North Goodman Street

Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated

Cork Road Industrial Estate

Waterford, X91 V383, Ireland

Date of Issue: 2018-07



Indicates the CE conformity marking and the notified body number

®/™ торговая марка компании Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

P9WW03/ 1802321